



Välinehuolto

Erihyd Termo Desinfektioaine



Käyttöalue

Erihyd Termo desinfektioaine on 20 %:sta glutaarialdehydiä käyttävien endoskooppien pesukoneiden desinfektioaine.

Pintadesinfektio	Instrumenttidesinfektio	Veri- ja eritetahradesinfektio
-	x	-

Ominaisuudet

Erihyd Termo desinfektioaineella on laajakirjainen mikrobisidinen teho. Erihyd Termo tuhoaa tehokkaasti gram +, gram- sekä tbc-bakteerit. Se tehoaa myös viruksiin (mm. HBV, HIV), sieniin, hiivoihin ja bakteeri-itiöihin. Tähystimien turvallinen desinfectiotaso saavutetaan, kun tuotetta käytetään automaattisissa endoskooppien pesu- ja desinfectiokoneissa, jotka on ohjelmoitu käyttämään 20 % glutaraldehydiä desinfectioaineena.

Käyttöohje

Erihyd Termo kanisteri liitetään koneen automaattiannostelijaan. Tähystin yhdistetään puhdistus- ja desinfectiokoneeseen laitekohtaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Endoskooppien paineilma- ja suositellaan päivän toimenpiteiden päätteeksi ennen tähystimien säilytykseen vientiä. Ennen Erihyd Termo desinfectioaineen käyttöönottoa on varmistettava, että valmiste soveltuu käytössä olevan endoskooppien pesu- ja desinfectiokoneen desinfectioaineeksi.

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Glutaarialdehydi	20 %	mikrobisidi
Etyylialkoholi	5 – 15 %	stabilointiaine

pH

tuotteen pH 4

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Valmistusmaa

Suomi

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Tuotetta ei saa päästää suoraan ympäristöön.

**Pakkauskoko/
Tuotekoodi**

3x5 l
1x20 l

KiiltoClean

8140
8152

GTIN

641260 008140 4
-

Sailab

20070222
20070222

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

04/14