

Välinehuolto

Hydragel

Esikäsittelyaine instrumenteille



- Käyttöalue** Hydragel on instrumenttien esikäsittelytuote tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. Tuote estää orgaanisen lian kiinnittymisen ja kuivumisen sekä mikrobien lisääntymisen käytetyissä instrumenteissa.
- Ominaisuudet** Hydragel sumutetaan käytössä olleiden instrumenttien päälle. Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle mikrobeja läpäisemättömän pinnan. Geelikalvo estää lian kuivumisen kiinni instrumentteihin sekä mikrobien lisääntymisen ja leviämisen. Vaikutus kestää 5 vrk. Tuotetta voidaan käyttää tarvittaessa myös pesutehosteena hankalasti puhdistuville instrumenteille. Sopii yleisesti käytössä oleville materiaaleille. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta.
- Käyttöohje** Sumuta Hydragel esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Käytä kannellisia laatikoita. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.
- Huomioitavaa** Puhdista roiskeet vedellä. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.
- Koostumus** Säilöntä-, korroosionesto- ja vaahdonestoaineita
- pH** 9
- Varastointi** Säilytettävä huoneenlämmössä. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.
- Valmistusmaa** Suomi
- Käyttö- ja ympäristöturvallisuus** Tuote on biologisesti hajoaava. Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyönteinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko/ tuotekoodi	KiiltoClean	GTIN	Sailab
6 x 750 ml suihkepullo	8222	6417964082227	20080421

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.