

Välinehuolto

Erinox

Erikoispesuaine



Käyttöalue

Erinox on matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen.

Erinox sopii hyvin

- ultraäänipesulaitteen pesuaineeksi
- endoskooppien käsin suoritettavaan puhdistukseen
- hoitovälineistön käsin suoritettavaan pesuun
- hammaslääkärin instrumenttien pesuun
- herkän lasitavaran pesuun
- laboratoriovälineiden pesuun

Erinox Erikoispesuaine irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen

Ominaisuudet

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos Erinox Erikoispesuaineesta. Valmis käyttölaimennos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen. Huuhtelevälineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

Käyttöohje

Erinox käyttö- ja laimennos ohjeet	%	Erinox	Vesi	Huom!
Ultraäänipesulaitteet	1 % - 2 %	10 ml 20 ml	1 l 1 l	vaihda laimennos 1-2 x pv esiliotus tarvittaessa 2 %
Käsin suoritettava pesu			1 l	
- endoskoopit	2 %	20 ml	1 l	
- muu välineistö	1- 2 %	10- 20 ml		
Peruspesu/vaikea lika	5 %	50 ml	0,95l	

Huomioitavaa	Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.		
Koostumus	Ionittomia tensidejä < 5% Polykarboksylaatia <5%	pesuteho dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja	
pH	Tuotteen pH 10 Käyttölaimennoksen pH 10		
Varastointi	Säilytettävä huoneenlämmössä. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.		
Valmistusmaa	Suomi		
Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus	Tuotteen sisältämät tensidit ovat helposti biohajoavia.. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.		
Pakkauskoko/ Tuotekoodi		KiiltoClean	GTIN
	6x1 l pullo	8113	6417964081138
	3x5 l kanisteri	8114	6417964081145
			Sailab
			20070222
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.		

03/15