



VÄLINEHUOLTO

ERINOX TERMO

ERIKOISPESUAINE



Käyttöalue

Erinox Termo on pesuaine endoskooppien pesu- ja desinfektioilaitteisiin.

Ominaisuudet

Erinox Termo pesuaine on tuotekehitetty erityisesti endoskooppien koneelliseen pesuun. Erinox Termo sopii käytettäväksi useimmissa endoskooppien pesu-desinfektioilaitteissa.

Käyttöohje

Erinox Termo kanisteri liitetään koneen automaattiannostelijaan. Annostus 0,3 – 1 %. Endoskoopin esikäsitteily ja -pesu suoritetaan laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Tähytyn liitetään pesu- ja desinfektio-koneeseen. Valitaan haluttu pesu- ja desinfektio-ohjelma, kone annostelee pesuaineen ja desinfektioaineen automaattisesti.

Desinfektioaineena käytetään Erihyd Termo tai Thermoton Endo desinfektioainetta.

Huomioitavaa

Ennen Erinox Termo pesuaineen käyttöönottoa on varmistettava, että valmiste soveltuu käytössä olevan endoskooppien pesu- ja desinfektio-koneen pesuaineeksi.

Koostumus

Anionisia tensidejä	< 5 %	pesuteho
Ionittomia tensidejä	< 5 %	pesuteho
2-propanoli	< 5 %	isopropanoli, liuotin
Natriumsitraatti	< 5 %	dispergointiaine
Natriumpolyakrylaatti	< 5 %	dispergointiaine
Natriumglukonaatti	5 - 15 %	dispergointiaine
Monopropyleeniglykoli	5 - 15 %	liuotin

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, kellertävä neste

pH tiivisteessä pH käyttöliuoksessa

Tiivisteiden pH 10,0
Käyttöliuoksen pH 9,5

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko ja tuotekoodi		KiiltoClean	EAN	Sailab
3x5 l kanisteri		8141	641260 008141 1	20070222
1x20 l kanisteri		8151	641260 008151 0	20070222

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

