

Pintojen puhdistus ja desinfektio

Easydes

Pesevä pintadesinfektioaine



Käyttöalue

Easydes on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen pesevä pintadesinfektioaine. Easydes sopii kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille. Se sopii useimmille muovimateriaaleille myös hammashuollon osa-alueella.

Pintadesinfektio	Instrumentidesinfektio	Veri- ja eritetahradesinfektio
x	x pintapyyhintä	x pienet eritetahrat

Ominaisuudet

Easydes on etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Easydes on mikrobisidisesti laajatehoinen, nopeavaikutteinen sekä orgaanista rasiusta kestävä. Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet. Desinfektio teho saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Easydes poistaa hyvin lian ja rasvan. Easydes Desinfektiopyyhkeiden koko on 200x135mm, materiaalina 60 % polyester/40 % viskoosi. Pakkauksessa on 16 pyyhettä.

Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN 13697 (bakteerit ja sienet, myös modifioitu testi desinfektiopyyhkeille), EN 13727 ja EN 13713 bakterisidinen teho, myös MRSA-kannat, EN 14348 (mykobakteerit M. terrae ja M. avum), EN 1650 fungisidinen teho sekä virusidisen tehon testit EN 14476 (adenovirus), BVDV ja vaccinia. Myös teho norovirukseen on todennettu (30s).

Käyttöohje

Easydes Pesevä desinfektioaine on käyttövalmis liuos. Annostelu: Kostuta pinnan pyyhinnässä käytettävä taitos tai siivouspyyhke desinfektioaineella.

Easydes Desinfektiopyyhkeet ovat käyttövalmiita sellaisenaan. Merkitse käyttöönottopäiväys pakkaukseen. Käytä avattu pakkaus 7 vrk kuluessa. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

Huomioi riittävä kosteus. Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti. Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa.

Noudata laitevalmistajien puhdistus- ja desinfointiohjeita.

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.



Clostridium difficile epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta, sillä alkoholipohjaiset tuotteet eivät tuhoa bakteeri-itiöitä.

Koostumus	Etanoli	60 p-%	biosidi	
	Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine	
	Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho	
	Alkyyliamiini	< 0,5 %	biosidi	
pH	10			
Varastointi	Huoneen lämmössä 3 v. Pyyhepakkaus 2 v. valmistusajankohdasta.			
Valmistusmaa	Suomi			
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista. Pyyhepakkaus on polypropeenaa. Pakkaukset ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavaa materiaalia. Käytetyt kertakäyttöpyyhkeet ovat energijaetta tai sairaalajätettä.			
Pakkauskoko/ Tuotekoodi		KiiltoClean	GTIN	Sailab
	6x500 ml pullo	8081	641260 008081 0	20070223
	3x5 l kanisteri	8082	641260 008082 7	20070223
	16 x 16 kpl pyyhepakkaus	8285	641796 408285 2	20070223
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.			

06/16