




VÄLINEHUOLTO

# ALU DEKO

KONEPESUAINE

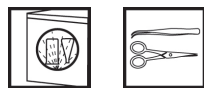

## Käyttöalue

Alu Deko on nestemäinen, vaahtoamaton konepesuaine huuhtelu- ja pesudesinfektiolaitteisiin terveydenhuollon eri toimipisteissä. Alu Deko sopii hyvin myös hammashuollossa käytettävälle välineistölle.

## Ominaisuudet

Alu Deko on tuotekehitetty yleisesti terveydenhuollossa käytettävien konepestävien instrumenttien, välineiden ja materiaalien pesuun. Alu Deko konepesuaineessa on käytetty mahdollisimman työturvallisia ja ympäristömyötäisiä, tutkittuja raaka-aineita. Puhdistusteho on optimoitu ja testattu terveydenhuollon erityisvaatimusten mukaiseksi (Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio). Tuote soveltuu myös herkille materiaaleille. Vaahtoamaton.

## Käyttöohje

Alu Deko -kanisteri liitetään pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellisen annostuksena suositellaan konekohtaisesti 30-70 ml/pesu, pesuainepitoisuus n. 0,3 %. Annostuksen määrään vaikuttavat pestävä materiaali, veden määrä ja veden laatu. Huomioi pesukonetta täytettäessä, että vesisuihkut pääsevät esteettömästi pestävien välineiden kaikille pinnoille. Letkut ja muut hankalasti puhdistettavat välineet asetetaan omiin telineisiinsä. Pesuvaihe 45-55°C. Pesukone lämpödesinfioi puhdistetun välineistön ja koneen sisäosat valitun ohjelman mukaisesti. Laitteen moitteeton toiminta on syytä tarkistaa määrä-ajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

## Huomioitavaa

Ärsyttävä, käytä suojakäsineitä.

## Koostumus

Kompleksointiaineita	5-15 %	sitovat veden kovustekijöitä
Polykarboksylaatteja	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa, sitoo sen veteen
Na-metasilikaatti	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja
Fosfonaatti	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta

## Ulkonäkö ja tuoksu pH tiivisteessä pH käyttöliuoksessa

Kirkas, kellertävä neste.  
13  
11,0

## Varastointi

Säilytettävä huoneenlämmössä. Varjeltava jäätymiseltä. Säilyy 3 vuotta valmistuspäivästä.

## Valmistusmaa

Suomi

## Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Pesuaineen raaka-aineet ovat helposti biologisesti hajovia. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

## Pakkauskoko/ tuotekoodi

	KiiltoClean	EAN	Sailab
3x5 l	80387	641260 080387 7	20100329
1x20 l	8084	641260 008084 1	20100329
1x200 l	8280	-	-

## Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

