



VÄLINEHUOLTO

## STEEL

HAPAN ERIKOISPESUAINE  
INSTRUMENTTIPESUKONEILLE JA INSTRUMENTEILLE



### Käyttöalue

Steel on erikoistuote instrumenttipesukoneiden ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien pinnan kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon. Poistaa tahroja myös silikoni- ja muovipinnoilta.

### Ominaisuudet

Steel poistaa saostumat ja kirkastaa metallipinnat. Se sopii myös useimmille alumiini-, messinki- ja kuparimateriaaleille. Erikoispesuaine soveltuu sekä manuaaliseen että koneelliseen käyttöön. Tuote huuhtoutuu pinnoilta hyvin.

### Käyttöohje

Instrumenttikoneen puhdistus: 100-300 ml (0,5 - 1,5 % laimennos), kalkinpoisto-ohjelma. Jos käytetään muita pesuohjelmia, on varmistettava, ettei ohjelma ota pesuainetta Steel erikoispesuaineen lisäksi. Myös instrumentit voidaan puhdistaa koneessa samanaikaisesti.

Instrumenttien puhdistus: 20 % käyttöläimennos (2 dl/0,8 l vettä) lämpimään veteen, 30 min - 1 h liotusaika. Jos saostumaa jää instrumentteihin, pyyhi pinta. Pese ja huuhtelee instrumentit heti liotuksen jälkeen.

Käyttöläimennos ultraäänipesulaitteessa: 20 ml - 200 ml/1 - 0,8 l lämmintä vettä. Instrumenttien liotus 30 min, jonka jälkeen ohjelman kesto 10 min, huolellinen huuhtelu. Käytetty liuos vaihdetaan päivittäin.

### Huomioitavaa

Hapan tuote. Ei saa sekoittaa klooripitoisten aineiden kanssa. Tuote ei saa kuivua pinnoille. Roiskeet puhdistetaan vedellä. Käytä suojakäsineitä.

### Koostumus

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Orgaaniset hapot    | 15-30 % | liuottaa saostumat                 |
| Glykolieetteri      | 5-25 %  | liuotin, lisää puhdistustehoa      |
| Ionittomat tensidit | < 5 %   | pinnan kostuttaja, pesuaktiiviaine |

### Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste, ominainen tuoksu

### pH tiivisteessä pH käyttöliuoksessa

Tuotteen pH n. 1,5  
Käyttöläimennoksen pH n. 3

### Varastointi

Säilytettävä alle 28 °C lämpötilassa. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.

### Valmistusmaa

Suomi

### Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Pakkaus PE-HD muovia, joka on kierrätyskelpoista ja poltettavaa.

### Pakkauskoko/ tuotekoodi

|             |                     |                        |                    |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 6x1 l pullo | KiiltoClean<br>8224 | EAN<br>641260 008224 1 | Sailab<br>20100331 |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|

### Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

