



Välinehuolto

Descoton 2% GDA

Desinfektioaine



Käyttöalue

Terveysthuollon ammattikäyttöön: Liotusdesinfektio instrumenteille ja tähystimille. Erittäin herkän välineistön/materiaalin desinfiointiin: mm. hammashuoltoon proteettisille töille, kumi- ja muovivälineistöille, kirurgisille instrumenteille, jäykille ja taipuisille endoskoopeille sekä endoskopiavälineistöille, optikoille, TEE- anturien desinfiointiin.

Pintadesinfektio	Instrumenttidesinfektio	Veri- ja eritetahradesinfektio
-	x	-

Ominaisuudet

Käyttövalmis, materiaalityötäinen, mikrobisidisesti erittäin laajakirjainen ja nopeavaikutteinen aktivoitua 2 % glutaarialdehydiä sisältävä desinfektioaine.

Tuote on lääkinällinen laite (Medical Devices Directive 93/42/EEC).

Tutkimuksia: Dr. Brill, Hamburg: Examination of the bactericidal and fungicidal disinfection effectiveness., Expert report on the effectiveness against Mycobacterium terrae.
Dr. Steinmann, Virologist, Bremen: Expert report on Hepatitis C virucidal activity (BVDV).
Expert report on Vaccinia virucidal activity.
Prof. Werner, Schwerin: Expert's report on sporicidal activity (Clostridium difficile)

Käyttöohje

Pese instrumentit/välineet ennen desinfiointia glutaarialdehydiä sisältävällä tuotteella. Pestyt välineet upotetaan desinfektioaineeseen, kannelliseen liotusastiaan. Huomioi, että desinfiointavat instrumentit peittyvät kokonaan ja aine pääsee vaikuttamaan mahdollisiin kanaviin, sisäosiin ja kaikille pinnoille. Instrumenttidesinfektiossa vaikutusaika (kontaktaika) 5 min. High level desinfiointiteho saavutetaan 45 min vaikutusajalla. Vaikutusajan päätyttyä välineet huuhdotaan (puhdas vesijohtovesi/steriili aqua) ja kuivataan huolellisesti. Samaa desinfiointiliuosta voidaan käyttää 28 vrk ajan, mikäli liuos on silmämääräisesti puhdas. Vaihda likaantunut liuos.

Koostumus

Glutaarialdehydi 2% mikrobisidi

pH

5.0 +/- 0.5

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Valmistusmaa	Saksa. Tuotteen valmistaja on Dr.Schumacher GmbH.		
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Tuote on biologisesti hajoavaa. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Tuotetta ei saa päästää suoraan ympäristöön.		
Pakkauskoko/ Tuotekoodi	3x5 l	KiiltoClean 8130	GTIN 4260241965247
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .		