

Pintadesinfektio

# Cleanisept Wipes

## Desinfektiopyyhe



### Käyttöalue

Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeitä käytetään lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin (MDD, luokka IIb). Pyyhkeet sopivat erinomaisesti käytettäväksi myös ultraäänilaitteiden antureiden desinfektioon (mm. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Toshiba, Esaote, Zonare, Hitachi, Weinmann, Compumedics).

### Ominaisuudet

Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeet ovat nukkaamatonta kuitukangasta. Mikrobisidisestä tehosta on saatavilla laajat tutkimustulokset (bakteerit, sienet (EN 13697), virukset (BVDV, vaccinia, Rota, Papova). Desinfektioaineseos on pH:ltaan neutraali ja soveltuu myös herkille materiaaleille, esim. erilaiset muovit. Tuote on dermatologisesti testattu. Pakkaus sisältää 100 kpl rullasta repäistävää kertakäyttöistä kuitukangaspyyhettä, pyyhkeen koko 14 x 20 cm.

### Käyttöohje

Muovipakkaus sisältää suljetussa pussissa olevan pyyherullan. Kierrä kansi auki, leikkaa halkio pussin yläsaumaan ja pujota pyyherullan keskellä oleva pää kannessa olevan käyttöaukon läpi.

Käyttötilanteessa pyyhe irtoa rullasta helpoiten, kun vedät pyyhettä ulospäin ja samanaikaisesti painat toisella kädellä pakkauksen läppäkantta kiinni. Suljettaessa kuuluva napsahdus varmistaa, että läppäkansi on tiiviisti suljettu.

Pyyhi kontaminoitunut alue ja anna sen kuivua. Pinnan voi tarvittaessa kuivata, mikäli se on kostea vielä 1 min. jälkeen. Laita käytetty pyyhe roskiin. Desinfektioaineille herkimät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä päivittäin myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.

### Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Koostumus

Didecylmethylammoniumchlorid  
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid  
Alkylethylbenzyldiemethylammoniumchlorid

### pH

n. 7,5



<b>Varastointi</b>	Säilytettävä huoneenlämmössä.. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.. Avattu pakkaus käytettävä 6 kk kuluessa. Sulje kansi aina käytön jälkeen.  Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika sisäpakkauksessa.									
<b>Valmistusmaa</b>	Saksa. Maahantuojana KiiltoClean Oy.									
<b>Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus</b>	Materiaalit soveltuvat kierrätykseen. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä.									
<b>Pakkauskoko/ Tuotekoodi</b>	<table><thead><tr><th></th><th><b>KiiltoClean</b></th><th><b>GTIN</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>12 x 100 pyyhettä, muovipakkaus</td><td>8080</td><td>42600 6862189 0</td></tr><tr><td>12 x 100 pyyhettä, täyttöpakkaus</td><td>8085</td><td>42600 6862970 4</td></tr></tbody></table>		<b>KiiltoClean</b>	<b>GTIN</b>	12 x 100 pyyhettä, muovipakkaus	8080	42600 6862189 0	12 x 100 pyyhettä, täyttöpakkaus	8085	42600 6862970 4
	<b>KiiltoClean</b>	<b>GTIN</b>								
12 x 100 pyyhettä, muovipakkaus	8080	42600 6862189 0								
12 x 100 pyyhettä, täyttöpakkaus	8085	42600 6862970 4								
<b>Lisätietoja</b>	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiiltoclean.fi">www.kiiltoclean.fi</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.									

06/14