

Oxivir Plus

Pesevä desinfectioaine

Kuvaus tuotteesta

Oxivir Plus on pesevä desinfectioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinällisten välineiden ja laitteiden sekä vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfectioon. Lisäksi se soveltuu myös eritetahradesinfectioon.

Ominaisuudet

- Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni
- Laaja mikrobisidinen teho

Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
- Puhdistaa ja desinfectoi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaika.
- Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfectiovaan puhdistukseen:
 - terveydenhuollon vaativissa kohteissa
 - kosteissa tiloissa
 - lämpimissä tiloissa
 - keittiötiloissa.
- Tavanomaisiin desinfectioaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi.
- Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
- Mikrokuitupyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
- Kestää likarasiitusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
- Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
- Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
- Soveltuu tekstiilipintojen desinfectiovaan puhdistukseen.
- Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin.

Käyttöohje

Pintadesinfectio

1. Valmista käyttöliuos oheisen taulukon mukaan.
2. Tee käyttöliuos viileään veteen. Mittaa ensin vesi ja lisää sen jälkeen Oxivir Plus.

Valmiin käyttöliuoksen määrä

Tiivisteen määrä	Pitoisuus	Valmista käyttöliuosta
1 litra	3,5 %	29 litraa
5 litraa	3,5 %	143 litraa

CE
0088



Oxivir Plus

Pesevä desinfektioaine

Käyttöohje jatkuu

Käyttötarkoitus	Pitoisuus	Laimennus	Käytössä huomioitavaa
Pintadesinfektio: Puhtaat pinnat	1 %	10 ml + 990 ml vettä	Pyyhi pinta huolellisesti käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä.
Pintadesinfektio: Likaiset pinnat	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Märkäpyyhintä tai kosteapyyhintä. Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä.
Eritetahradesinfektio	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Levitä liuos tahraan ja pyyhi tahra pois.
Tekstiilipintojen desinfiointi puhdistus	3,5 %	35 ml + 965 ml vettä	Poista irtolika tai erite. Annostele liuosta suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahrann keskusta kohden. Imeytä liuennut tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhtelee pinta lopuksi vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.
Pintadesinfektio	15 %	150 ml + 850 ml vettä	

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, kellertävä neste
Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,0
pH-arvo, laimentamaton	0,5
pH-arvo käyttöliuos:	1,5 +/- 0,5

Koostumus:

Hapteen perustuva desinfiointiaine (peroksygeeni)	5 - 15 %
Ionittomia ja anionisia pinta-aktiivisia aineita, fosfonaattia, fosfaattia	< 5 %

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa. Vain ammattikäyttöön. Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä käyttöliuosten valmistuksessa. Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks. käyttöturvallisuustiedote.

Varastointi:

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Suositeltavin säilytyslämpötila on + 6 - + 35 °C. Säilyvyys: Oxivir Plus -tiiviste 2 vuotta avaamattomana tai avattuna valmistuspäivästä lukien. Pakkauksessa mainittu viimeinen käyttöpäivä. Käyttöturvallisuustiedotteet ja EN-testitulokset toimitetaan pyydettyä.

Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE Ila -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkausko	Pakkausmuoto
100826547	6 x 1 l	pullo
100827422	2 x 5 l	kannu

